



So Verwendest Du iTOVi Face Scan

Willkommen bei iTOVi Face Scan!
Wir freuen uns, diese neue Technologie mit dir zu teilen, damit du und deine Kunden die Funktionen nutzen können, um euch auf eurer Wellness-Reise zu unterstützen!

Schritt Eins
Registriere dich für iTOVi Face Scannen

Neu bei iTOVi?
Lade die iTOVi App herunter und wähle „iTOVi Face Scan heute kaufen“

Bereits für Face Scan registriert?
Gehe zu Schritt Zwei

Klicke auf Jetzt kaufen, um ein Face-Scan-Abonnement zu einem neuen oder bestehenden iTOVi-Konto hinzuzufügen

Schritt Zwei
Face Scan öffnen

Wähle aus, wen du scannen möchtest, oder erstelle einen neuen Kunden zum Scannen

Schritt Drei
Zustimmung zum Scan

Lies den Haftungsausschluss zur nicht-medizinischen Nutzung und den Hinweis zur Informationsweitergabe, um zu verstehen, dass iTOVi Face Scan kein medizinisches Gerät ist, keine Diagnosen stellt und keine Behandlungen für medizinische Zustände empfiehlt, sowie wie iTOVi die aus deinem Scan abgeleiteten Daten verarbeitet, speichert und weitergibt. Aktiviere beide Kontrollkästchen, wenn du zustimmst. Danach kannst du den Scan starten, indem du auf die Schaltfläche Scan starten klickst.

Der Scan beginnt sofort nach dem Drücken von Scan starten

Schritt Vier
Scan starten

Während des Scans wird die Messqualität in Form von Sternen oben links angezeigt – je mehr Sterne, desto besser. Wenn du zu nah oder zu weit von der Kamera entfernt bist, erscheint ein Hinweis, der dich auffordert, dich in eine bessere Position zu bewegen.

Während der Scan fortschreitet, siehst du eine pulsierende thermische Kartenanzeige auf deinem Gesicht, während deine Wellness-Messwerte erfasst werden.

Die Fortschrittsleiste zeigt an, wie weit der Scan fortgeschritten ist.

Nach einigen Sekunden werden Live-Messwerte für Herzfrequenz, Stressindex und Herzfrequenzvariabilität für die Dauer des Scans angezeigt.

Du kannst den Scan jederzeit vor Abschluss stoppen.

Schritt Fünf
Scan abgeschlossen

Klicke auf Bericht anzeigen, um deine Wellness- und Produktberichte zu sehen



So liest du die iTOVi Face Scan Berichte

IToVi Face Scan bietet zwei Berichte zur Unterstützung deiner Wellness-Reise!

- Wellness-Bericht
- Produktbericht

Zugriff auf deine Face-Scan-Berichte

Klicke direkt nach einem Scan auf Bericht anzeigen

Klicke auf das Symbol Ich. Klicke unter Aktivität auf Scan-Berichte

Klicke auf das Symbol Kunde. Wähle den Kunden aus. Klicke unter Aktivität auf Scan-Berichte

Wähle oben den Tab Face Scans, um alle früheren Face Scans zu sehen. Klicke auf einen Face Scan, um ihn zu öffnen

Trendoptionen

Trends können als Einstellung ein- oder ausgeschaltet werden

Du kannst die Metrik ändern, indem du auf die Filter-Schaltfläche (3 Linien) klickst. Scrolle zur Metrik und klicke auf Speichern, um den Trend anzuzeigen

Ändere die Trend-Zeiträume, indem du auf die unteren Tabs klickst (1 Woche, 1 Monat, 6 Monate, 1 Jahr oder Alle)

Wellness-Bericht

7 Hauptmetriken

Direkt aus deinem Gesichtscan abgeleitet. Klicke auf jede Metrik, um mehr zu erfahren.

Hinweis: Gelegentlich können bestimmte Metriken nicht angezeigt werden. Dies kann auftreten, wenn die Scanqualität oder die Datenverfügbarkeit nicht ausreicht, um eine verlässliche Wellness-Einschätzung zu liefern.

Die 5 Metriken in den oberen zwei Reihen zeigen links deinen geschätzten Wert und rechts den Normalbereich.

Am unteren Rand befinden sich personalisierte Produkte für diese Metriken. Du kannst jedes Produkt anklicken, um die Produktpage zu öffnen und mehr zu erfahren.

Parasympathische Aktivität und Herzfrequenzvariabilität zeigen ihre Werte links an. Für diese Metriken gibt es keinen „Normalwert“, da sie stark von Person zu Person variieren können, abhängig von Alter, Geschlecht und individuellen Faktoren. Das Beobachten von Trends über die Zeit und das Zuordnen von Mustern zu Veränderungen im Leben ist der beste Weg, um den idealen Bereich für dich zu erkennen. Aufgrund der natürlichen Unterschiede zwischen Personen werden für diese Metriken keine Produktempfehlungen gegeben.

iTOVi Face Scan ist eine Wellness-Funktion und kein medizinisches Gerät oder medizinischer Dienst. Es ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten oder Gesundheitszustände zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Die bereitgestellten Messwerte und Erkenntnisse dienen ausschließlich allgemeinen Wellness- und Informationszwecken und stellen keinen Ersatz für professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung dar. iTOVi Face Scan gibt keine medizinischen Meinungen oder klinischen Bewertungen ab. Wenn Sie gesundheitliche Bedenken, Symptome haben oder glauben, einen medizinischen Notfall zu erleben, wenden Sie sich umgehend an einen qualifizierten Gesundheitsdienstleister. Konsultieren Sie stets einen qualifizierten Gesundheitsdienstleister, bevor Sie gesundheitsbezogene Entscheidungen auf Grundlage der in dieser App bereitgestellten Informationen treffen.

Herzfrequenz
Verfolgt Ihre durchschnittlichen Herzschläge pro Minute, um Ihnen zu helfen, Muster im Zusammenhang mit dem Gleichgewicht des Nervensystems und der allgemeinen körperlichen Vitalität zu beobachten.
73 bpm (Normalbereich: 60-100 bpm)
Produkte für diese Kennzahl: Vitamin A, Vitamin B-12, Vitamin E

Kardiale Belastung
Dieser Kennzahl dient ausschließlich der allgemeinen Wellness-Überwachung und bewertet keine Herzerkrankungen oder medizinischen Zustände.
130 mmHg

Blutdruck
115/65 mmHg

Atemfrequenz
17 bpm

Stressindex
22

Parasympathische Aktivität
13%

Herzfrequenzvariabilität
39 ms

Zusätzliche Metriken

Wellness-Zusammenfassung
Füllen Sie diese kurze Umfrage mit möglichst vielen Informationen aus, um die unten angezeigten Messwerte zu generieren.
Umfrage öffnen

Produkt-Bericht

Zusätzliche Metriken

Diese Metriken basieren hauptsächlich auf benutzerbereitgestellten Daten aus der Umfrage. Punktzahlen und Indikatoren werden durch die Wellness-Algorithmen von iTOVi berechnet, um zusätzliche Wellness-Einblicke zu liefern. Öffne jede Unterkategorie, um die einzelnen Kategorien anzuzeigen. Klicke auf Umfrage öffnen, um weitere Informationen einzugeben.

Wellness-Zusammenfassung
Füllen Sie diese kurze Umfrage mit möglichst vielen Informationen aus, um die unten angezeigten Messwerte zu generieren.
Umfrage öffnen

Langfristige Wellness-Indikatoren

Stoffwechsel-Wellness-Indikatoren

Körperzusammensetzungsmetriken

Produkt-Bericht

Wellness-Score

Direkt aus deinen Gesichtsscans und dem Wellness-Score-Algorithmus abgeleitet.

Wellness-Score
Dieser kombinierte Wellness-Score vereint mehrere Lebensstil- und Körperindikatoren, um einen Gesamtüberblick über Balance und Vitalität zu geben.
68/100 (Normalbereich: 40-100/100)
Gut versorgt (Dieses Wohlbefinden)
Werte in diesem Bereich zeigen, dass Ihr Körper gut funktioniert und positiv auf Ihre Wellness-Routine reagiert. Mit ein paar sanften Anpassungen – wie tieferer Entspannung, achtsamer täglicher Rituale oder orientierungsfreier Pflanzenstoffe – können Sie Ihren Gesundheitsweg weiter stärken.

Kardiovaskulärer Vitalitätswert
Weitere Informationen erforderlich
Vollständigen Wellness-Bericht berechnen

Kardiovaskulärer Wellness-Score
Weitere Informationen erforderlich
Vollständigen Wellness-Bericht berechnen

Vaskuläres Wellness-Alter
Weitere Informationen erforderlich
Vollständigen Wellness-Bericht berechnen

Produkt-Bericht

Die Umfrage

Durch das Hinzufügen weiterer Informationen erscheinen tiefer Einblicke in den vier unteren Bereichen und deren Unterkategorien. Du kannst jederzeit zur Umfrage zurückkehren, um deine Antworten zu aktualisieren.
Hinweis: Je mehr Informationen du in der Umfrage angibst, desto mehr Metriken können berechnet werden. Einige Metriken werden ohne alle erforderlichen Daten nicht berechnet.

iTOVi Wellness-Metriken
Bitte geben Sie Ihre Informationen an, um personalisierte Wellness-Einblicke zu erstellen.

Demografische Daten

Körperliche Informationen

Kardiovaskulärer Wellness-Score
Verändert ein punktbasiertes Wellness-Model, das von bevölkerungsbezogener Forschung inspiriert ist, um kardiovaskuläre Trends zusammenzufassen.
75 Overall Score

Indikator für Leberwohlbefinden
Bietet Einblicke in stoffwechselbezogene Muster im Zusammenhang mit der Fettverbrennung und dem allgemeinen Leber-Wellness.
Stark

Zusätzliche Metrikbewertung

- Es werden zwei Bewertungssysteme verwendet.
- Skalierte Bewertung von 0-100
- Ausrichtungen: Niedrig, Moderat oder Stark

Gesamtwerte sind gewichtete Kombinationen der Teilwerte.



How to Read the iTOVi Face Scan Reports

Zugriff auf den Produktbericht

Du kannst auf das obere Dropdown-Menü klicken, um auf jeden Bericht zuzugreifen. Klicke auf den Bericht, den du öffnen möchtest

Du kannst auf das untere Vorschau-Symbol klicken, um den Produktbericht zu öffnen

Deine Berichte teilen

Klicke oben im Bericht auf das Teilen-Symbol. Ein Fenster öffnet sich, um PDF oder E-Mail auszuwählen.

PDF öffnet die Freigabeoptionen deines Telefons zum Teilen per Text, E-Mail oder deiner bevorzugten App. Ein mehrseitiges PDF mit deinen Scan-Metriken und dem Produktbericht wird erstellt und gesendet.

E-Mail sendet eine Kopie des Produktberichts an die E-Mail-Adresse der gescannten Person. Diese E-Mail wird auch nach Abschluss eines Face Scans gesendet.

Hinweis: Dieses PDF enthält persönliche Wellness-Informationen, die auf deine Anfrage hin erstellt wurden. Nach dem Herunterladen oder Teilen bist du für den Schutz dieser Daten verantwortlich. Einige Freigabemethoden (z. B. E-Mail oder Messaging-Apps) sind möglicherweise nicht verschlüsselt.

Berichte filtern

Du kannst deine Berichte nach Produkttyp und Anzahl der Produkte filtern. Klicke auf die oberen Registerkarten, um deine Optionen zu ändern

standardmäßig werden 5 Produkte und alle Produkttypen angezeigt

Produkttyp ändern

Anzahl der Produkte ändern

Produktbericht

Deinen Produktbericht lesen

Rangnummern: Je höher der Rang, desto stärker ist das Produkt mit deinen gewichteten Wellness-Metriken korreliert. #1 ist der höchste

Durch Klicken auf ein Produkt wird die Seite „Produktinformationen“ geöffnet, um weitere Details anzuzeigen

Herzfrequenz: 69 bpm

Die Symbole der 3 am stärksten korrelierten Metriken für dieses Produkt werden unter dem Produktnamen angezeigt. Diese Symbole entsprechen denen auf deinen 5 primären Metrikkarten

Produkttyp-Symbole:

- Öle
- Mischungen
- Nahrungsergänzungsmittel