




Ako používať iTOVi Face Scan

Vítajte v iTOVi Face Scan!
Sme nadšení, že s vami môžeme zdieľať túto novú technológiu, aby ste vy a vaši klienti mohli využívať jej funkcie na podporu vašej cesty k wellness!

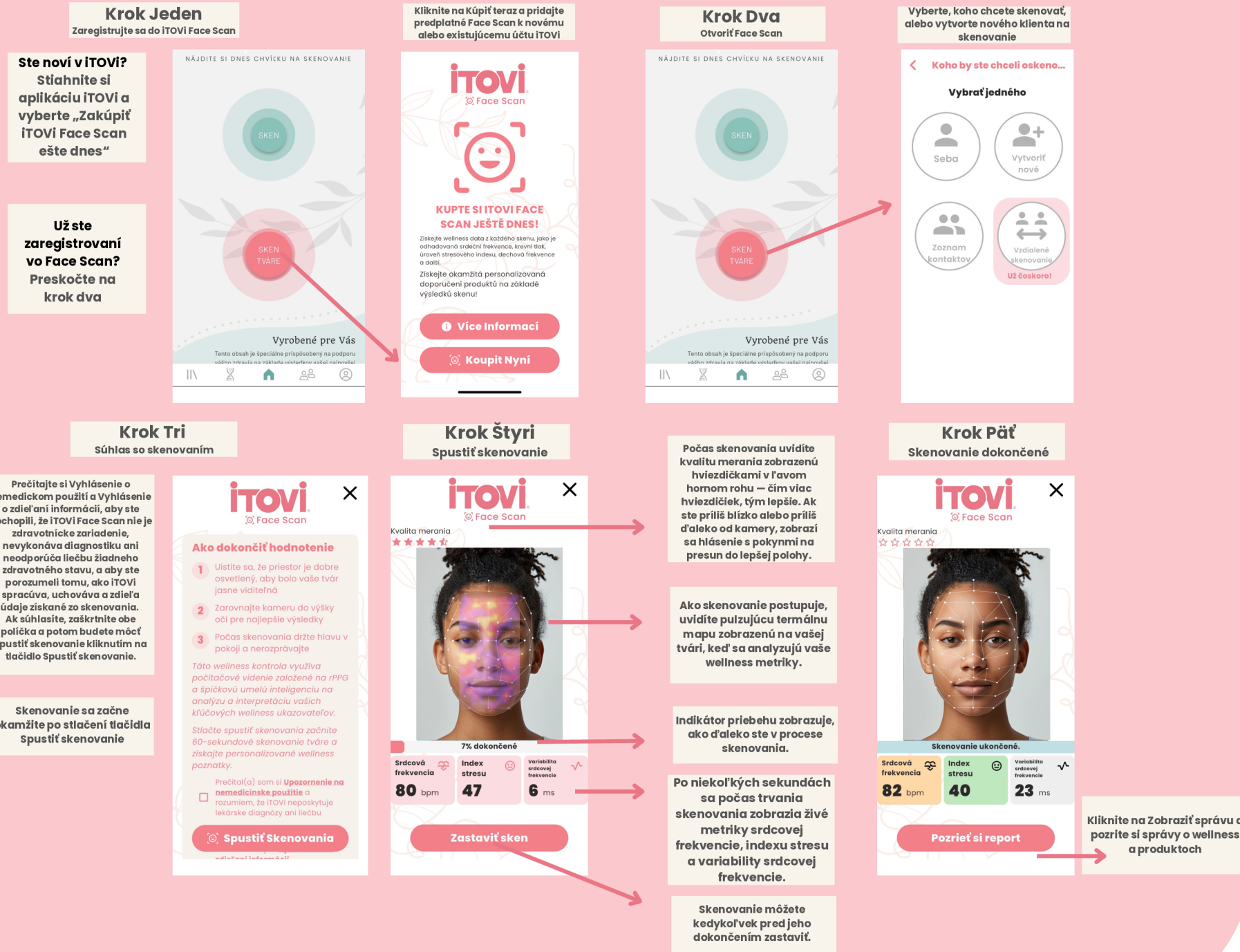




Ako čítať správy iTOVI Face Scan

iTOVI Face Scan ponúka dve správy na podporu vašej wellness cesty!

- Wellness Správa
- Produktová Správa

Prístup k správam Face Scan

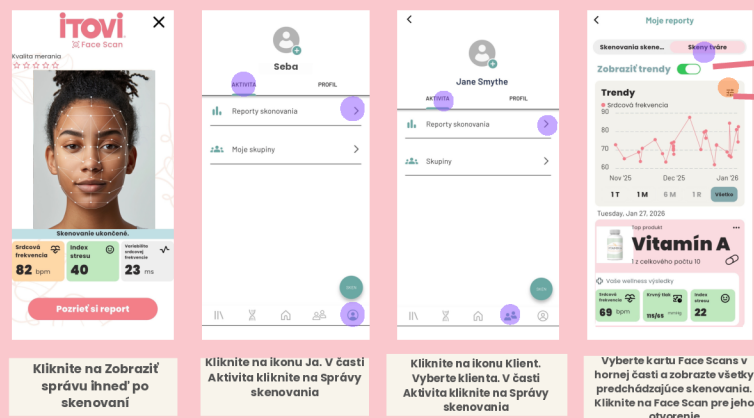


Kliknite na Zobraziť správy ihneď po skenovaní

Kliknite na ikonu Ja. V časti Aktivity kliknite na Správy skenovania

Kliknite na ikonu Klient. Vyberte klienta. V časti Aktivity kliknite na Správy skenovania

Vyberte kartu Face Scan v hornej časti a zobrazte všetky predchádzajúce skenovania. Kliknite na Face Scan pre jeho otvorenie

Možnosti trendov

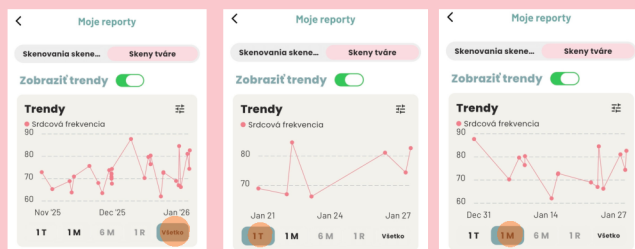

Zobrazenie trendov je možné zapnúť alebo vypnúť podľa preferencií

Metriku môžete zmeniť kliknutím na tlačidlo filtra (3 ikony). Prejdite na metriku a kliknite na Uložiť, aby ste zobrazili jej trend

Časové obdobia trendov môžete meniť kliknutím na spodnú kartu (1 týždeň, 1 mesiac, 6 mesiacov, 1 rok alebo Všetko)

Wellness Správa

7 primárnych metrik
Odvodené priamo zo skenu tváre. Kliknutím na každú metriku sa dozviete viac

Poznámka: Niektoré metricky sa môžu občas nezobraziť. Môže sa to stať, ak kvalita skenu alebo dostupnosť údajov nie je dostatočná na poskytnutie spoľahlivého wellness prehľadu.

5 metrik v horných dvoch riadkoch zobrazuje váš odhadovaný výsledok v rámci a normálny rozsah vpravo.

V spodnej časti sú zobrazené personalizované produkty pre tieto metricky. Kliknutím na každý produkt otvoríte jeho stránku a dozviete sa viac.

Parasympatická aktivita a variabilita srdcovej frekvencie zobrazujú svoje hodnoty v tvare. Pre tieto metricky neexistuje „norma“, pretože sa môžu výrazne líšiť medzi jednotlivcami v závislosti od veku, pohľavia a individuálnych faktorov. Sledovanie trendov v čase a ich prepojenie so zmenami vo vašom živote je najlepší spôsob, ako zistiť ideálnu úroveň pre vás.

Z dôvodu prirodzených rozdielov medzi jednotlivcami sa pre tieto metricky neposkytujú odporúčania produktov.

Srdcová frekvencia

69 bpm

Normálny rozsah 60-100 bpm

Produkty pre túto metriku

- Vitamin B-12
- Vitamin A
- Vitamin E

Parasympatická aktivita

13 %

Táto metrika poskytuje wellness poznatky o ríe je určená na diagnostiku porúch nervového systému so súvisiacimi problémami so stresom.

Wellness správa

Srdcová frekvencia: 69 bpm

Srdcová zrážka: 130 mmHg

Krvný tlak: 115/65 mmHg

Dychová frekvencia: 17 bpm

Index stresu: 22

Parasympatická aktivita: 13 %

Variabilita srdcovej frekvencie: 39 ms

Ďalšie metricky

Súhrn wellness

Report o produkte

Dotatočné metricky

Tieto metricky sú odvodené najmä z údajov zadávaných používateľom v dotazníku. Skóre a ukazovatele sú vypočítané wellness algoritmi iTOVI, aby vám poskytli ďalšie wellness poznatky.

Otvorte každú podsekciju a zobrazte jednotlivé kategórie. Kliknite na otvoriť dotazník a zadajte ďalšie informácie.

Wellness správa

Ďalšie metricky

- Súhrn wellness
- Otvoriť dotazník
- Prehľad kardiovaskulárneho wellness
- Dihodobé wellness indikátory
- Metabolické wellness indikátory
- Metricky zloženia tela
- Report o produkte

Wellness Skóre

Odvodené priamo z údajov zo skenu tváre a algoritmu wellness skóre.

Skóre pohody

68 /100

Normálny rozsah 40-100/100

Výživný (Vysoká pohoda)

Skóre v tomto rozsahu naznačuje, že telo funguje dobre a pozitívne reaguje na vašu wellness rutinu. Jemné spravy – napríklad hlboká relaxácia, vedome dýchanie alebo podporné bylinky – môžu ďalej podporiť vašu cestu k zdraviu.

Wellness správa

Prehľad kardiovaskulárneho wellness

- Vek vasculárnej pohody
- Skóre kardiovaskulárnej pohody
- Skóre kardiovaskulárnej vitality
- Report o produkte

Dotazník

Pridaním ďalších informácií sa zobrazia hlbšie poznatky v štyroch dolných sekcijách a ich podkategóriách. Do dotazníka sa môžete kedykoľvek vrátiť a aktualizovať svoje odpovede.

Poznámka: Čím viac informácií zadáte do dotazníka, tým viac metrik je možné vypočítať. Niektoré metricky sa bez všetkých požadovaných údajov nevypočítajú.

iTOVI

Wellness metricky

Poskytnite, prosím, svoje informácie na generovanie personalizovaných wellness poznatkov.

Demografické údaje

Fyzické informácie

Skóre kardiovaskulárnej pohody

75

Výšivka wellness môže indikovať prítomnosť rizikových faktorov na prírutne trendov kardiovaskulárneho systému.

Indikátor pečeneového wellness

Silný

Bodovanie doplnkových metrik

Používajú sa dva systémy bodovania.

- Škálované bodovanie 0-100
- Zarovnanie: Nízke, Stredné alebo Silné

Čelkové skóre sú vážené kombinácie čiastkových skóre.

iTOVI Face Scan je wellness funkcia a nie je zdravotníckym zariadením ani zdravotníckou službou. Nie je určená na diagnostiku, liečbu, vyšetrenie alebo prevenciu akýchkoľvek chorôb alebo zdravotného stavu. Poskytované metricky a poznatky sú iba len na všeobecné wellness a informačné účely a nenahrádzajú odborné lekárske poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. iTOVI Face Scan neposkytuje lekárske rady ani klinické hodnotenia. Ak máte akúkoľvek zdravotnú obavu, príznaky alebo sa domnievate, že môžete mať zdravotnú potrebu, okamžite vyhľadajte pomoc kvalifikovanej zdravotníckej pracovníčky. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí týkajúcich sa zdravia na základe informácií poskytnutých touto aplikáciou sa vždy poraďte s licencovaným zdravotníckym pracovníkom.




Ako čítať správy iTOVi Face Scan

Prístup k produktovému prehľadu




Kliknutím na horné rozbaľovacie menu získate prístup ku každému prehľadu. Kliknite na prehľad, ktorý chcete otvoriť.

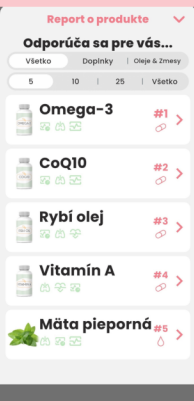

Kliknutím na spodné okno náhľadu otvoríte produktový prehľad.

Zdieľanie vašich prehľadov

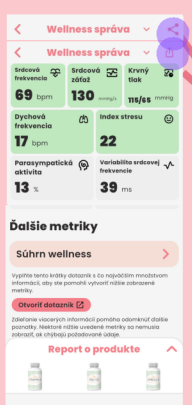

Kliknite na symbol zdieľať v hornej časti prehľadu. Otvorí sa okno na výber PDF alebo e-mailu.



PDF otvorí možnosti zdieľať vášho telefónu na zdieľanie cez správu, e-mail alebo obľúbenú aplikáciu.

Vytvorí sa a odôle viacstranový PDF obsahujúci vaše metriky skenovania a produktový prehľad.



E-mail odôle kópu produktového prehľadu a e-mailovú adresu skenovanej osoby. Tento e-mail sa odôle oš po dokončení Face Scan.




Poznámka: Tento PDF obsahuje osobné wellness informácie vygenerované na vašu žiadosť. Po stiahnutí alebo zdieľaní ste zodpovední za ochranu ľubto súberu. Niektoré spôsoby zdieľania (napr. e-mail alebo aplikácie na správy) nemusia byť filtrované.


Filtrovanie prehľadov

Svoje prehľady môžete filtrovať podľa typu produktu a počtu produktov. Kliknutím na horné karty zmeníte možnosti.


Predvolené sa zobrazuje 5 produktov a všetky typy produktov

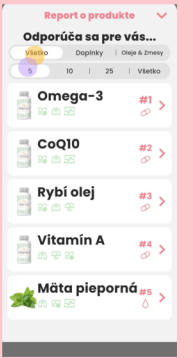


Zmeniť typ produktu

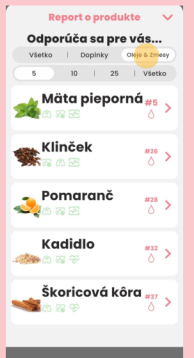

Zmeniť počet produktov

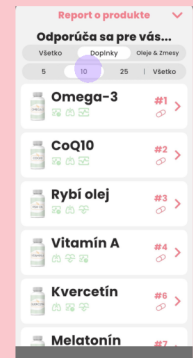


Produktová Správa

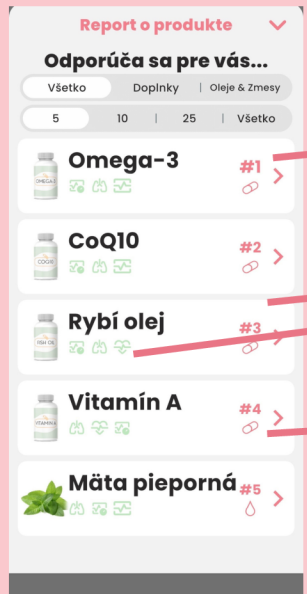

Čítanie produktového prehľadu

Hodnotiace čísla Čím vyššie hodnotenie, tým viac je produkt prepojený s vašimi váženými wellness metrikami. #1 je najvyššie

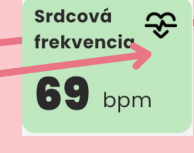

Kliknutím na produkt sa otvorí stránka informácie o produkte s ďalšími detailmi

Ikonky 3 najviac korelovaných metrick pre tento produkt sú zobrazené pod názvom produktu. Tieto ikony zodpovedajú ikonám na vašich 5 hlavných kartách metrick

